

# Uso de Oxitocina en el sistema de inyección Uniject™\* (10 UI en 1 ml)

**1** Revise el indicador de tiempo y temperatura, y confirme que la oxitocina esté en buen estado para ser usada. Si no deséchela y use un nuevo Uniject que contenga oxitocina.




**2** Abra el paquete de aluminio y retire el Uniject.




**3** Active el Uniject.



- Sostenga el Uniject por la válvula con sus dedos índice y el pulgar.
- Con un movimiento rápido y firme empuje la tapa de la aguja hacia la válvula.
- Continúe empujando firmemente hasta que el espacio entre la tapa de la aguja y la válvula se haya cerrado.

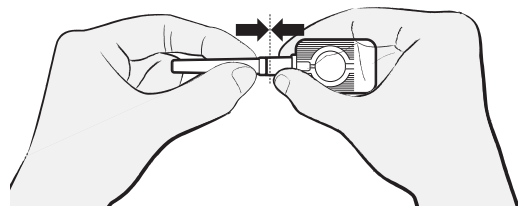


**4** Retire la tapa de la aguja.

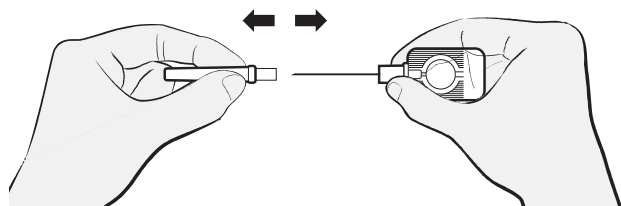


**5** Continúe sosteniendo el Uniject por la válvula e inserte la aguja a la mujer.

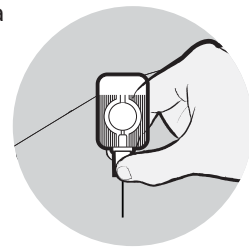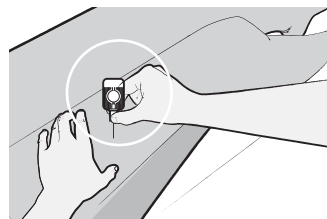


**6** Apriete la ampolla firmemente para inyectar la oxitocina. Después que la ampolla se colapse completamente, retire el Uniject.

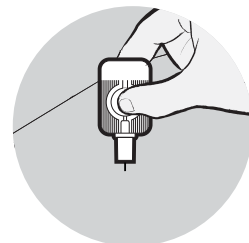

**7** No vuelva a tapar el Uniject usado.

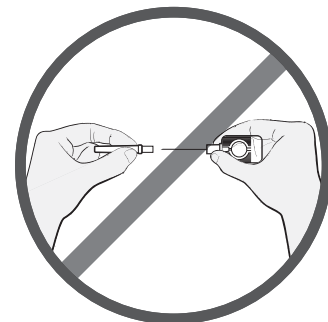

**8** Deseche el Uniject usado de acuerdo a los procedimientos establecidos para la eliminación de desechos médicos.

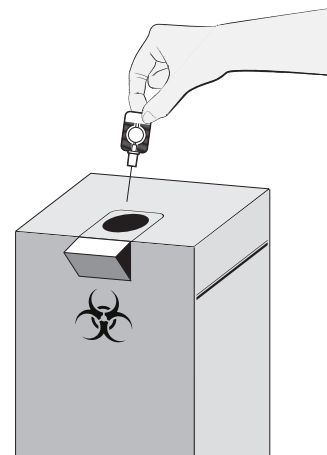

\* Uniject es una marca de BD.

Copyright © 2011, Program for Appropriate Technology in Health (PATH). El material en este documento puede usarse libremente para fines educativos o no comerciales, siempre y cuando el material esté acompañado por una línea de reconocimiento.